

TULKOJUMS

LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, rue Léon Jouhaux - ZA PARIEST CROISSY BEAUBOURG F-77435 MARNE LA VALEE CEDEX 2	TEHNISKO DATU LAPA GATAVS PRODUKTS	Apstiprinu:
	Failas: C:/FICHE/FT	Izdevums: 0 / 08.06.09 Pārskatīts: 9 / 10.12.15 Lapa: 1 no 3

LAPA Nr. 1216-FT

NOSOCOMIA SPRAY

DEFINĪCIJA

NOSOCOMIA SPRAY ir spēcīgs, aldehīdus nesaturošs kontakta dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts sienu, grīdu, virsmu un I klases medicīnas ierīču (medicīniskās gultas, ratiņkrēsli, stetoskopi, zobārstniecības krēslu u.tml.) dezinfekcijai bez noslaucīšanas ar rokas aerosoliem vai elektriskajiem smidzinātājiem.

SASTĀVS

Polyaminopropyl biguanide CAS No 32289-58-0 (0.36% w/w), propan-2-ol Cas No 67-63-0 (30% w/w) un aromatizators.

TESTI

- 1. Organoleptiskās īpašības**
 - Aspekts: caurspīdīgs šķidrums
 - Smarža: puķu
- 2. Fizikāli ķīmiskās īpašības (pie 20 ° C)**
 - Tīrs pH: 5.5 - 6.0

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Izmantojams manuālos vai elektriskos pulverizatoros. Izsmidzināt 30 līdz 40 ml/m² aptuveni 30 cm attālumā no dezinficējamās virsmas, kas iepriekš ir notīrīta. Atstāt iedarboties 5 līdz 15 min atbilstoši nepieciešamajam efektam. Nenoslaucīt. Nenoskalojiet. Notīrīt iekārtas ar ūdeni. Atkārtot darbības saskaņā ar vietējo higiēnas protokolu.

LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, rue Léon Jouhaux - ZA PARIEST CROISSY BEAUBOURG F-77435 MARNE LA VALEE CEDEX 2	TEHNISKO DATU LAPA GATAVS PRODUKTS	Apstiprinu:
	Failas: C:/FICHE/FT	Izdevums: 0 / 08.06.09 Pārskatīts: 9 / 10.12.15 Lapa: 2 no 3

IZMANTOŠANAS JOMAS

1. Slimnīcas un medicīnas iestādes:

- **Augsta riska zonas:** ekspluatācijas bloki, intensīvās terapijas nodaļas, priekšlaicīga bērnu vienības, transplantācijas un sadedzināt vienības, u.c.
- **Slimnīcas:** istabas, laboratorijas, geriatrijas vienības, pediatrijas nodaļas, utt.

2. Rūpniecības higiēna:

NOSOCOMIA SPRAY izmantojams dažādu nelielu aprīkojuma ārējo virsmu dezinfekcijai farmācijas, kosmētikas u.c. industrijā.

MIKROBIOLOGISKĀS ĪPAŠĪBAS

NOSOCOMIA SPRAY atbilst standartiem:

1. Baktericīdu iedarbība:

- EN 1040, 5 min
- EN 1040, 5 min (*Staphylococcus aureus MRSA*)
- T 72-301, aktīvs *Mycobacterium tuberculosis*
- T 72-300, aktīvs *Listeria monocytogenes*
- EN 13697, 5 min, tīrības noteikumi, bactericidal
- EN 1276, tīrības noteikumi
- EN 1276, tīrības noteikumi (*Escherichia coli*, extended-spectrum β -lactamase (ESBL))
- EN 13727, tīrības noteikumi, 5 min
- NFT 72-281 baktericīda aktivitāte, 15 min
- NF EN 13727, 5 min, tīrības noteikumi, *Staphylococcus aureus MRSA*
- EN 14561, 15 min, tīrības noteikumi

2. Pretsēnišu iedarbība:

- EN 1275, 15 min (*Candida albicans*)
- EN 13697, 5 min, tīrības noteikumi, (*Candida albicans*)
- EN 13624, 5 min, tīrības noteikumi, (*Candida albicans*)
- EN 14562, 15 min, tīrības noteikumi, (*Candida albicans*)

3. Pretvīrusu iedarbība:

- aktīvs pret *HIV* vīrusu 5 min
- aktīvs pret *Herpes* vīrusu 5 min
- aktīvs pret *Rotavirus* 5 min
- aktīvs pret *PRV* 1 min (vīruss pseudorange, modelis *Hepatitis B* vīrusu) saskaņā ar protokolu par standarta NFT 72-180
- aktīvs pret *MNV* (modelis vīrusu cilvēka norovirus) saskaņā ar metodoloģiju standarta EN 14476
- aktīvs pret *H1N1* 5 min saskaņā ar metodoloģiju standarta EN 14476

LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, rue Léon Jouhaux - ZA PARIEST CROISSY BEAUBOURG F-77435 MARNE LA VALEE CEDEX 2	TEHNISKO DATU LAPA GATAVS PRODUKTS	Apstiprinu:
	Failas: C:/FICHE/FT	Izdevums: 0 / 08.06.09 Pārskatīts: 9 / 10.12.15 Lapa: 3 no 3

KOROZIJA

NOSOCOMIA SPRAY ir rūsu izraisošs varam un misiņam, vienkārši iegremdējot, bet ne alumīnijam vai nerūsējošajam tēraudam.

IZMANTOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**Ievērot īpašos norādījumus / drošības datu lapas**

Nesasaldēt. Nenorīt.

Neizmanto kopā ar citiem dezinfekcijas līdzekļiem vai citiem produktiem.

Lietojiet biocīdus piesardzīgi. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Iepakojums jāiznīcina kā bīstamie atkritumi, vai kā nebīstami atkritumi, ja ir izskalots, par ko pilnībā ir atbildīgs pats īpašnieks.

Neizmest tīru produkta vidē.

Avārijas gadījumā sazinieties ar tuvāko vides centru.

IEPAKOJUMS

- Kaste ar 6 x 750 ml smidzinātāja pudelēm
- Kaste ar 6 x 1 L smidzinātāja pudelēm
- Kaste ar 2 x 5 L kannām

STABILITĀTE

Oriģinālajā rūpnīcas iepakojumā un normālos glabāšanas apstākļos NOSOCOMIA SPRAY var uzglabāt 3 gadus.

NOSOCOMIA SPRAY atbilst sekojošiem kritērijiem

Nesatur glutaraldehīdu
Viegli lietojams
Ātri žūst